


BAÑO DE ULTRASONIDOS: EASYCLEAN RENFERT

1. DESCRIPCIÓN: Máquina generadora de ultrasonidos para el lavado de piezas, prótesis o utensilios diversos.

2. PARTES:

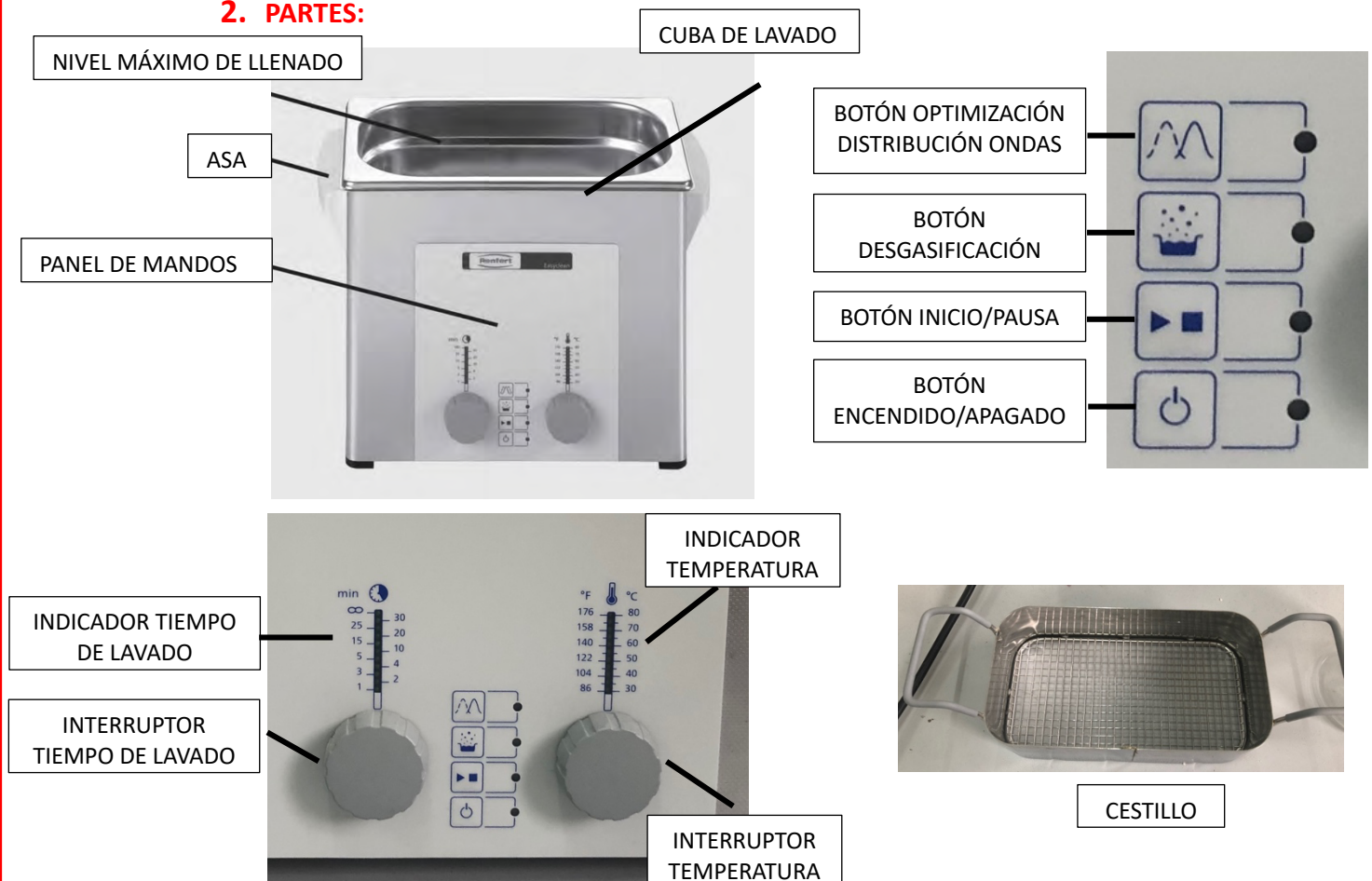

3. MANEJO DEL APARATO:

1. Llenar la cuba de lavado con el líquido limpiador, como máximo hasta la línea de llenado máximo (con las piezas a limpiar en el interior).
2. Depositar los objetos a limpiar en un vaso de cristal o de plástico e introducirlos en la cuba. Se puede utilizar el cestillo de manera opcional.
3. Encender el aparato con el botón de encendido.
4. De manera opcional, degasificar el líquido con el botón de degasificación.
5. Ajustar la temperatura de lavado con el interruptor giratorio.
6. Ajustar el tiempo de lavado con el interruptor giratorio.
7. Iniciar el lavado presionando el botón de inicio durante más de 2 segundos.
8. De manera opcional, presionar el botón de optimización de distribución de ondas sonoras si se desea.
9. Enjuagar las piezas después del lavado y vaciar el líquido del aparato.